


Manual de instrucciones

Retro / Star3 / Toirán

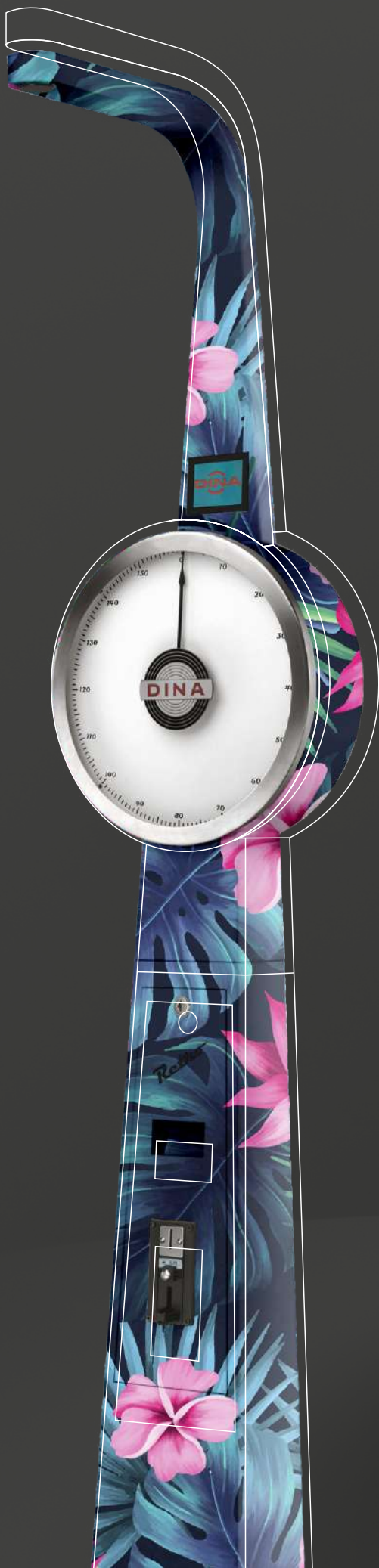



Índice

- 1 Transporte, recepción y desembalado
- 2 Insatención
 - Características de la zona para ubicar la máquina
 - Mantenimiento
- 3 Puesta en marcha
- 4 Funcionamiento
- 5 Menú de configuración
- 8 Características, precisión y normativas

TRANSPORTE Y DESEMBALADO DE LA BÁSCULA

Transportar y manejar la máquina con mucho cuidado.

Antes de desembalarla es necesario hacer una inspección visual externa del estado en que se encuentra. Si el embalaje presenta signos de malos tratos, deformaciones u otros defectos deberá prestarse especial atención en el estado interno del producto.

INSTALACIÓN

El equipo sale configurado y calibrado de fábrica y está listo para funcionar inmediatamente después de su desembalaje. No es necesaria una revisión o calibración periódica. El técnico instalador, verificara durante la instalación que la calibración es correcta.

- Características de la zona para ubicar la máquina

Este equipo debe instalarse en locales cubiertos, no puede estar sometido a condiciones externas ambientales, ambiente polvoriento o húmedo, ni campos de descargas eléctricos. Deberá estar **alejado de los focos directos de calor**, luz solar, humedad, radiación de infrarrojos u otros sistemas de emisión de energía calorífica. Así mismo debe evitarse situarlo cerca de dispositivos que emiten interferencias electromagnéticas como puertas automáticas.

La zona del suelo ocupada por la máquina será una superficie lisa y horizontal.

Las condiciones de uso y almacenamiento han de ser:

Temperatura: +5 ° C a +35 ° C

Humedad: 30 % a 75 %

Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

Es conveniente dejar un espacio libre alrededor de la misma, para poder acceder fácilmente al interruptor de desconexión, así como para asegurar la ventilación necesaria, así como la distancia de la parte trasera a la pared debe ser como mínimo de 10 cm.

Para asegurar la estabilidad del equipo, ajustar los pies de la máquina para que esta se apoye en sus 4 patas.

Colocar con cuidado la parte superior de la maquina encima del cuerpo inferior pasando los cables por la apertura y haciendo entrar los espárragos en los agujeros. Colocar los tornillos que se adjuntan y apretarlos firmemente con la llave Allen hasta que quede fijadas las 2 partes.

IMPORTANTE:

NO ENCHUFAR EL EQUIPO A LA RED ANTES DE CONECTAR LAS MANGUERAS.

Para garantizar la seguridad del usuario a causa de eventuales descargas eléctricas, es obligatorio conectarla en un enchufe provisto con toma de tierra de protección, que a su vez también garantiza la protección frente a posibles interferencias.

MANTENIMIENTO

El único mantenimiento que puede ser realizado por personal no cualificado es el cambio de papel.

No realice reparaciones por su propia cuenta.

En caso de avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.

Pondus MGL S.L. no se responsabiliza de las consecuencias derivadas por el incumplimiento de las precauciones antes descritas, ni de posibles modificaciones no autorizadas por el mismo, ni del posible uso inadecuado del producto.

PUESTA EN MARCHA

Poner en marcha actuando sobre el interruptor situado en la parte inferior trasera.

Al poner en marcha el equipo, en el monitor superior, aparecerá por breves instantes el mensaje de arranque que desaparecerá inmediatamente mientras continua el arranque que puede durar aproximadamente 1 minuto.

Durante ese tiempo se realizará el test inicial del equipo. Durante la prueba inicial se realiza la tara a 0 del sensor de peso. Por ello **es imprescindible que al poner en marcha el equipo no haya ningún peso en la plataforma**, si no el nivel cero no se calibraría correctamente y los resultados del peso serian erróneos.

Al finalizar estas operaciones, la máquina pasará al modo de exhibición, mostrando imágenes e información en las pantallas.

APAGADO DEL EQUIPO

Apague el equipo actuando sobre el interruptor situado en la parte inferior de la parte trasera, donde el cable de alimentación. Para apagar el equipo no hace falta ninguna precaución especial.



FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA

El pago de los servicios se realizará introduciendo monedas hasta igualar el precio del servicio requerido. **Hay que introducir el importe exacto** del servicio ya que **la maquina no devuelve el cambio**.

El monedero no funcionara si tenemos configurado el equipo en modo gratuito.

Si transcurre un tiempo superior al configurado (entre 3 y 15 segundos) y no se ha completado con monedas el crédito necesario para el servicio más barato, el crédito se pierde y vuelve a ser 0.

Si tarda más de un minuto en iniciar el servicio, subiendo a la plataforma, el servicio se dará por finalizado y se perderá el crédito acumulado y mostrará la pantalla principal.

PESO Y TALLA

Una vez iniciado el servicio, en la pantalla aparecerán las instrucciones para proceder para realizar el servicio correctamente. Se mostrará este mensaje indicando que suba a la plataforma. El pesaje empezara cuando detecte peso en la plataforma Si el peso es superior a 10kg una vez acabado el pesaje también medirá la altura. Durante el pesaje podrá ver como captura los datos de peso y talla. Al acabar imprimirá el tique con los resultados.


PESABEBÉS

El servicio de pesabebés se realiza pesando primero a la madre y luego a la madre con el bebe en brazos y restando los pesos. Seleccionar el servicio de PBB con el icono que aparece en el display **sin subir a la plataforma**.

A continuación, el adulto ha de subir a la plataforma y se realizará una tara. Al indicárselo en el display, debe bajar de la plataforma, coger al bebe en brazos, y subir de nuevo, cuando se lo indique la pantalla. El equipo esperara como máximo 1 minuto. Mostrará entonces el peso del bebe, que será impreso también en el tiquet.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Presionando primero en la esquina de arriba a la derecha y seguidamente en la de la parte inferior también derecha, mientras el equipo está en modo exhibición, aparecerá una nueva pantalla en la que se solicitará un código de tres dígitos para poder acceder al menú de ajustes y configuración de la máquina.

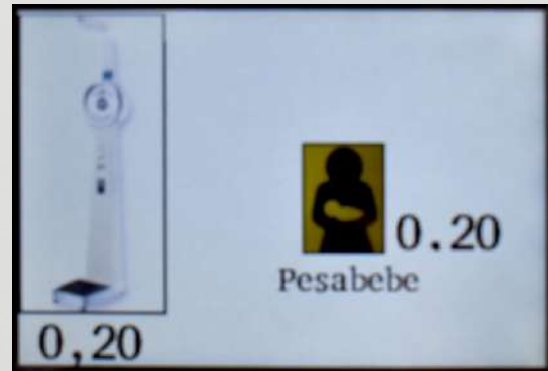

El código de acceso que debe introducir es el **256**, y presionar la tecla OK.

Entonces se accede a la pantalla táctil de configuración.




Aparece entonces la siguiente pantalla.




Reloj / Calendario

Ajustar el día y poner en hora el reloj del sistema. Presionando el icono de la flecha a la izquierda nos movemos lateralmente por los campos de datos, con los iconos (+) y (-) incrementamos o disminuimos su valor y con el icono OK confirmará guardando los cambios.

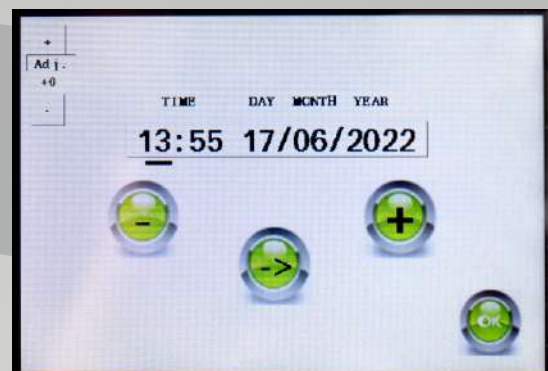


Idioma

Con la flecha puede ir pasando hasta tener el idioma deseado y seleccionarlo confirmando con el icono OK.

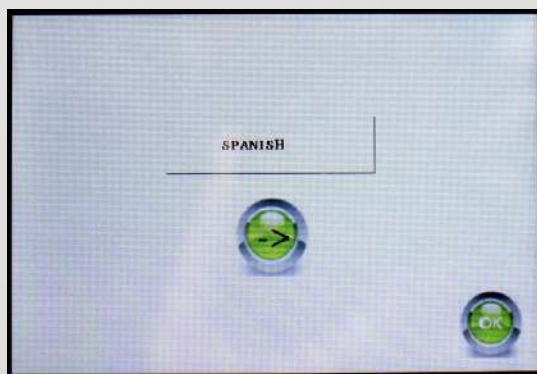

Beep


Seleccionar o no si deseamos que la báscula haga un pitido para indicar que ha terminado el proceso

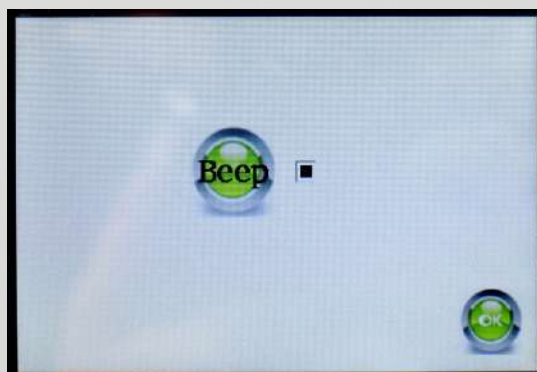

Total Recaudación


Al presionar sobre esta opción, podrá ver la contabilidad de los servicios. Pulsando el icono, le imprimirá un tiket con la información.

Si pulsa el icono de la papelera se borrarán el parcial.

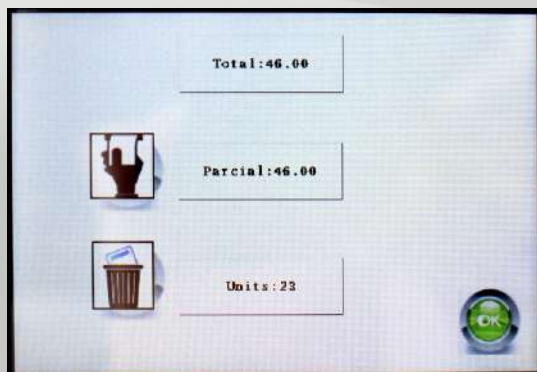


Precio

Para configurar el precio deseado, subimos o bajamos con las flechas hasta tener el importe deseado en cada servicio. En el caso de tener PBB, puede elegir el mismo o distinto precio para éste. Confirmaremos, cómo siempre, con el OK.

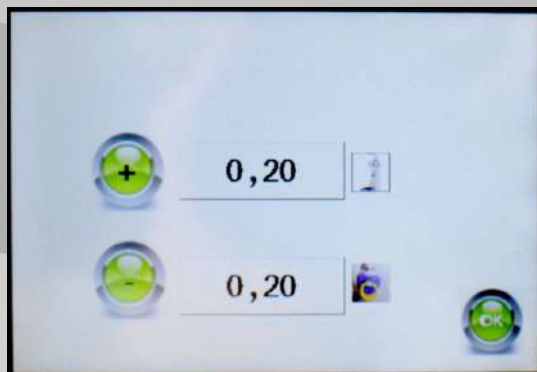


Cabecera y Pie de tique

Permite escribir un texto personalizado que se imprime en la cabecera y en el pie del tiket de 8 líneas ambas. Cada una con 24 caracteres.

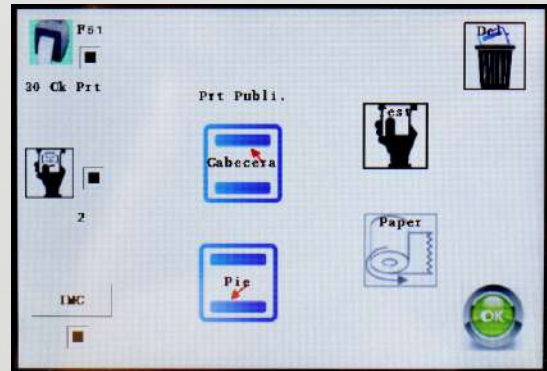

Para escribir, pulsamos encima de cada línea elegida y utilizamos el teclado que aparece en pantalla. Al entrar en la línea, hay que llevar el cursor hasta el punto donde queramos empezar a escribir con la tecla DEL. Para que el texto nos quede centrado, tendemos que tener en cuenta los 24 caracteres que tenemos.

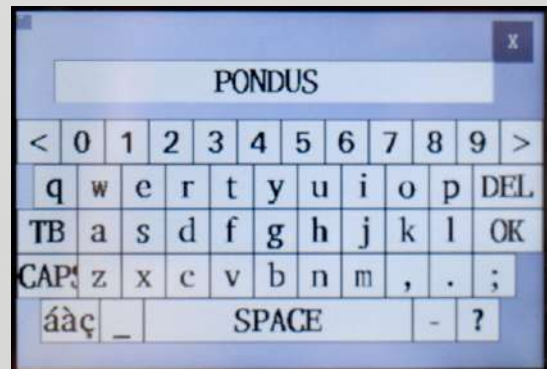


Con el icono **(1)** puede elegir entre los 3 gráficos posibles para que aparezcan en la cabecera del tiket, antes de cualquier texto que elijan (Copa con serpiente/Cruz/FARMACIA).

Con el **(2)** se activa o desactiva el IMC para que aparezca o no en el tiket.

Con el **(3)** puede imprimir un tiket de prueba.

Con el **(4)** pueden hacer un avance del papel. Esto le servirá para colocar bien el papel al hacer el cambio del rollo de papel.


El **(5)** es para borrar los datos que hayamos puesto. Volverán a aparecer los datos que vienen por defecto Solo se imprimirán las líneas que tengan texto añadido, es decir si el texto está todo en 4 líneas solo se imprimen 4 líneas.

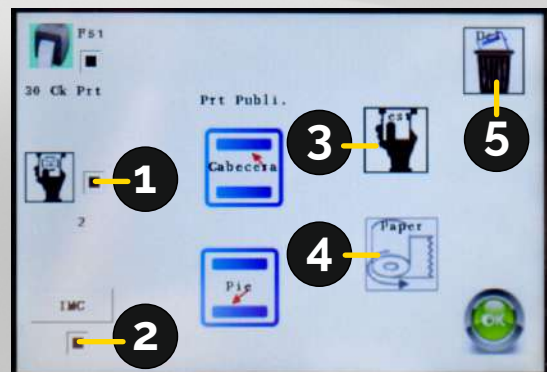

Dispaly

Puede introducir un texto de máximo 24 caracteres que aparecerá mientras la máquina esté en reposo.

Apretando en el icono de la pesa, que está en el lateral izquierdo de la pantalla, podrá elegir si quiere que en el display aparezca el peso del usuario al utilizarla, o no. En el caso de desconectarla, el peso aparecerá únicamente en el tiket.

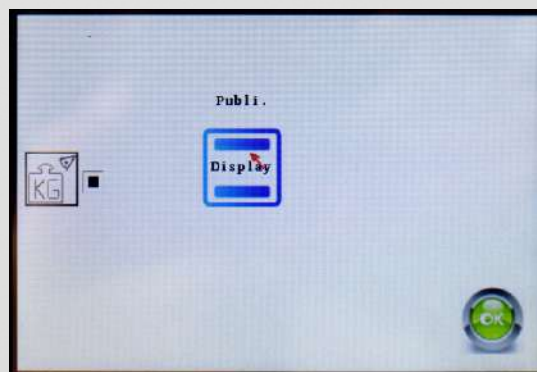

6.- CARACTERÍSTICAS, PRECISIÓN, NORMATIVAS

Modelo: Retro/Star2/Star3

Fabricante:

Pondus MGL S.L

C/ Emili Roca, 37 2º-2ª 08016 Barcelona

Dimensiones: 222cmts x 36cmts x 60cmts

Peso: 50 Kg

Consumo: 65W 100-260vac 50-60Hz

Monitor: Pantalla táctil de 3.2"

Rango peso: 0,030 – 150Kg

Precisión peso: 13 gramos

Exactitud peso: 11 gramos

Rango altura: 20 - 190 cmt

Precision altura: +/- 1cmt

Condiciones de almacenamiento y uso:

Temperatura: +15 °C a +35 °C

Humedad: 30 % a 75 %

Presión atmosférica: 700 kpa a 1060 kpar

Clasificación según norma de seguridad eléctrica EN 60601-1

Funcionamiento continuo.

Analizador de Impedancia Bioeléctrica: Tipo BF

Protección contra sobrecargas Eléctricas: Clase I.

Protección contra ingreso del Agua: Ordinario

Normas aplicables: EN 60601-1-2 (2007) / AC (2010)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012)

